

SUDA ERİYEN ÇAMAŞIR TORBASI



- Ölçü: 70cm x 100cm şeffaf, kendinden kapatmalı bantlıdır.
- Ambalaj: 1 pakette 25 adet torba, 1 kutuda 8 paket (= 200 adet)
- Malzemeler, alımdan sonraki 12 ay içerisinde tüketilmelidir.



Hastaneler için Sağladığı Faydalar:

- Hastane çalışanlarını, hasta ve yakınlarını olabilecek hastane enfeksiyonlarına karşı korur.
- Çevre zarar vermez. İçerdiği maddeler kullanımının hiçbir aşamasında çevreye karışmazlar.
- Hastane çalışanları zararlı vücut sıvılarından, kanda üreyen patojenlerden korur.



Vizyon İç ve Dış Ticaret A.Ş.

Ticaret Cd. No: 143-145 Giyimkent - Esenler / İstanbul
Tel: (+90) 212 438 24 70 (Pbx) Fax: (+90) 212 438 24 73

Web: www.vizyon-as.com
Mail: vizyon@vizyon-as.com

SUDA ERİYEN ENFEKTE ÇAMAŞIR TORBASI

ENFEKTE ÇAMAŞIR TORBASI

SUDA ERİYEN ÇAMAŞIR TORBASI

Temel Özellikler

- 45 C suda erir, tortu bırakmadan kaybolur.
- Anti-statik, zehirsiz, koku tutan gazlara ve eritmenlere karşı dayanıklıdır.
(Yapılan testler,torbanın bakteri ve virüs geçirmez olduğunu göstermiştir.)
- Bakteri ve virüsleri emer.
- Organik eritenlere, petrol ve gres yağlarına karşı dirençlidir.
- Mikroorganizmaları zararsız karbondioksite ve suya dönüştürür.



Kullanım Talimatları:

- Kilitli dış ambalajı açıp, içerisinde bir adet poşeti çıkartınız.
- Nemli/Isık parçaları daha kuru çamaşırların içerisinde sarınız.
- Poşetleri aşırı doldurmayınız, poşeti pembe bağ ile kapatınız.
- Poşetlere düğüm atmayınız.
- Peşetleri nakil ambalajına yerleştiriniz.
- Dolu poşetlerin saklama ve nakil esnasında kuru kalmasını sağlayınız.
- Poşetleri kapatılmış olan kilitli ambalaj içerisinde saklayınız.
- Depolama koşulları: %20 ila %70 nem arasında, 7 °C ila 30 °C.
- 45 °C ısıda min. 10 dak. boyunca yıkayınız.
- Bazı deterjanların kullanımı, çözünürlüğü arttırmak için daha yüksek yıkama sıcaklıkları gerektirebilir.