

AIR - FREE



Air-Free Set İçeriği

- 1 Adet Ucuna Bistüri Sabitlenmiş Trokar
- 1 Adet Standart Adaptör
- 1 Adet Suni Solunum Aparatı
- 1 Adet Manuel Aspirasyon Katateri
- 1 Adet Boyun Sabitleme Bandı

Klinik Çalışması

1. Asghar Schiri PourTscharlou et al., Clinical Anatomy 2006;19: 602 - 604.
2. Wilhelm Firbas et al., chir; praxis 2007;67: 401 - 406
3. A. Schiri pour Tscharlou', J. Klappenberger', S. Klappenberger ' ve W. Firbas1
Viyana Tıp Fakültesi, Anatomi Departmanı, Viyana, Avusturya
4. Ludwig Maxirmillian Üniversitesi, Cerrahi Departmanı, Münih, Almanya



• Adult



• Pediatrik



Vizyon İç ve Dış Ticaret A.Ş.



Ticaret Cd. No: 143-145 Giyimkent - Esenler / İstanbul
Tel: (+90) 212 438 24 70 (Pbx) Fax: (+90) 212 438 24 73

Web: www.vizyon-as.com
Mail: vizyon@vizyon-as.com

TEK ADIMDA CONIOTOMY UYGULAMASI

A
I
R
-
F
R
E
E



- Air-Free 22 saniye gibi kısa bir zamanda coniotomy uygulama fırsatı sağlar.
- Risksiz ve kullanımı kolaydır.

Air-Free Uygulama Metodu



1) Sol elle krikotomi boşluğu tespiti yapılır.



2) Sağ elde avuç içine oturtulmuş Airfree ile 5mm lik kesi yapılarak giriş yapılır.



3) Trokar, krikoid boşluğundan içeriye yerleştirilir.



4) Trokar geri çekilir ve solunum cihazı (ambu, ventilatör vs.) bağlanarak solunum işlevselleştirilir.

